

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



D100320



Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP320 CM 3.5 NP NB

3º PASSO

SELECIONAR A CINTA

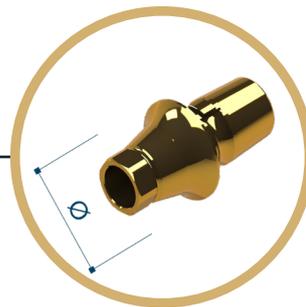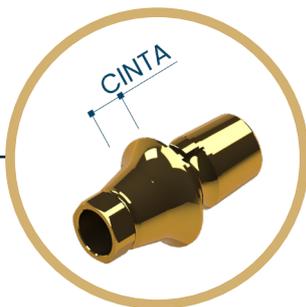

2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP320 CM 3.5 NP NB

TiBase AR COM perfil

Selecione

- 1.5mm
- 2.5mm
- 3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP320 CM 3.5 NP NB

Selecione uma opção...

- TiBase AR COM perfil
- TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1320CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1320CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1320SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1320SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1320CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1320CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1320SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1320SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1320CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1320CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1320SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1320SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

**INFORMATIVO**

Componentes COM perfil:

**Ø4.97mm**

Componentes SEM perfil:

**Ø4.00mm**

Parafusos

Hexagonal

Unigrip



M16HEB



M16UEB

4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200320