



COMPONENTES

Confie e use!

**SISTEMA CAD/CAM
EXOCAD**



COMPONENTES

Confie e use!

Quem somos

A **RP Componentes** é uma empresa brasileira com mais de 16 anos no mercado de componentes para próteses sobre implantes. Todos os componentes distribuídos pela **RP** possuem características de acoplamento ideais para ter uma conexão segura com os sistemas de implantes.

Para comprovação de sua segurança, eficácia e qualidade, foram realizados testes práticos, mecânicos e biológicos, assegurando que possuem resistência e estabilidade para exercer a função que foram indicados.

Todos os produtos comercializados pela **RP Componentes** são registrados e liberados pela **ANVISA**.

Missão, visão e valores



Fornecer produtos com qualidade garantida e certificada.



Apresentar soluções inovadoras, visando atender as necessidades dos profissionais do segmento odontológico.



Determinação e garra
Honestidade e ética
Equilíbrio Emocional
Humildade
Disciplina



Sistema CAD/CAM


Utilização	Pág.
Exocad – Seleção da Biblioteca	05
3i® – Sistema HE 3.25/3.4	06
Astra Tech® – Sistema CM 3.5/4.0.....	07
Branemark® – Sistema HE 3.75/4.0/4.1 BR	08
Conexão® – Sistema CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	09
Implacil de Bortoli® – Sistema HI 3.3/3.5	10
Implacil de Bortoli® – Sistema HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0	11
MIS® – Sistema HI 3.3	12
MIS® – Sistema HI 3.7/4.2	13
MIS® – Sistema CM 3.75/3.9/4.2/4.3/5.0	14
Neodent® – Sistema HE 3.3/3.5	15
Neodent® (11,5°) – Sistema CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	16
Neodent® GM – Sistema CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	17
Nobel Biocare® NP – Sistema CM 3.5	18
Nobel Biocare® RP – Sistema CM 4.3/5.0	19
Restore® – Sistema HE 5.0	20
SIN® (16°) – Sistema CM 3.5/3.8/4.5/5.0	21
SIN® (11,5°) – Sistema CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	22
Straumann® AP NC – Sistema CM 3.5	23
Straumann® AP NC/RC – Sistema CM 4.6	24
Straumann® NC – Sistema CM 3.3	25
Straumann® RB/WB – Sistema CM 3.5 a 6.5	26
Straumann® RC – Sistema CM 4.1/4.8	27
Straumann® RN – Sistema CM 3.3/4.1/4.8	28
Straumann® WN – Sistema CM 4.8/6.5	29
Mult Unit® – Sistema 4.8	30

Sistema CAD/CAM



1º

PASSO

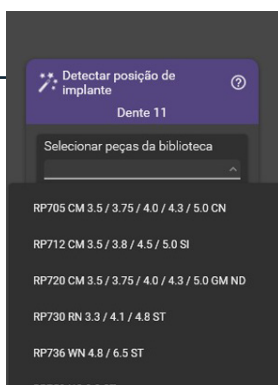


Seleção do Sistema

Selecione o sistema conforme o implante instalado em boca.

2º

PASSO

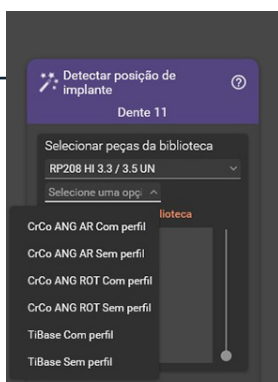


Seleção do Componente

Selecione o modelo de Tibase conforme planejamento do profissional.
Para essa seleção, leve em consideração o espaço protético e técnica a ser utilizada (prótese unitária ou múltipla).

3º

PASSO

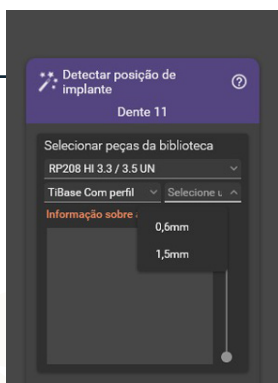

Seleção da Cinta

Selecione a altura de cinta do Tibase conforme o planejamento para confecção da prótese.

4º

PASSO



Posicionar o Transfer Digital

Selecione a face indicada no transfer e ajuste o posicionamento sobre o transfer escaneado.

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100104

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP104 HE 3.25/3.4 TR

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP104 HE 3.25/3.4 TR

Selecione uma opção...

HE 3.3 AR

HE 3.3 ROT

TiBase COM perfil

TiBase SEM perfil



Código	Identificação na Biblioteca
1104CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1104CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm
1104SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1104SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Quadrado



M20QU

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL



D200104

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100701


Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP701 CM 3.5/4.0 AT

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

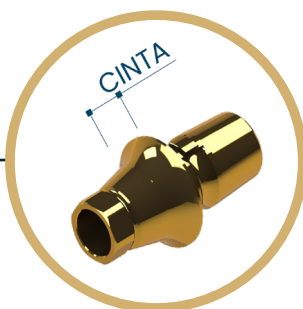

Selecionar peças da biblioteca

RP701 CM 3.5/4.0 AT


TiBase AR COM perfil

Selecione

1.0mm
2.0mm
3.0mm

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

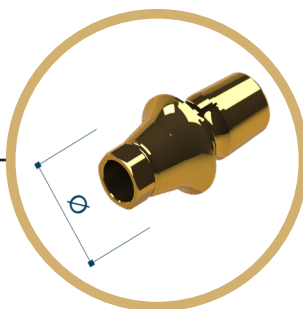

Selecionar peças da biblioteca

RP701 CM 3.5/4.0 AT

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
170ICLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
170ICSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm
170ISLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
170ISSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm
170ICLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm
170ICSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm
170ISLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm
170ISSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm
170ICLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
170ICSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm
170ISLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
170ISSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos


Hexagonal



M16HAT

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

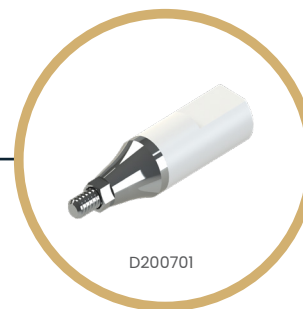

D200701

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA




Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP105 HE 3.75/4.0/4.1 BR

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

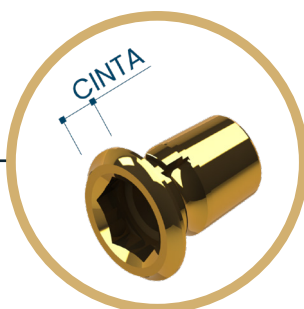

Selecionar peças da biblioteca

RP105 HE 3.75/4.0/4.1 BR


HE 4.1 AR

Selecione

0.6mm
1.5mm

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

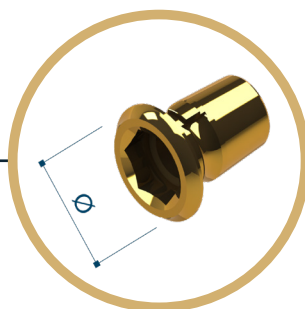

Selecionar peças da biblioteca

RP105 HE 3.75/4.0/4.1 BR

Selecione uma opção...

HE 4.1 AR
HE 4.1 ROT
TiBase COM perfil
TiBase SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1105CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1105CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm
1105SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1105SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm
1105CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1105CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1105SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1105SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Quadrado


32
N.cm

M20QU

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL



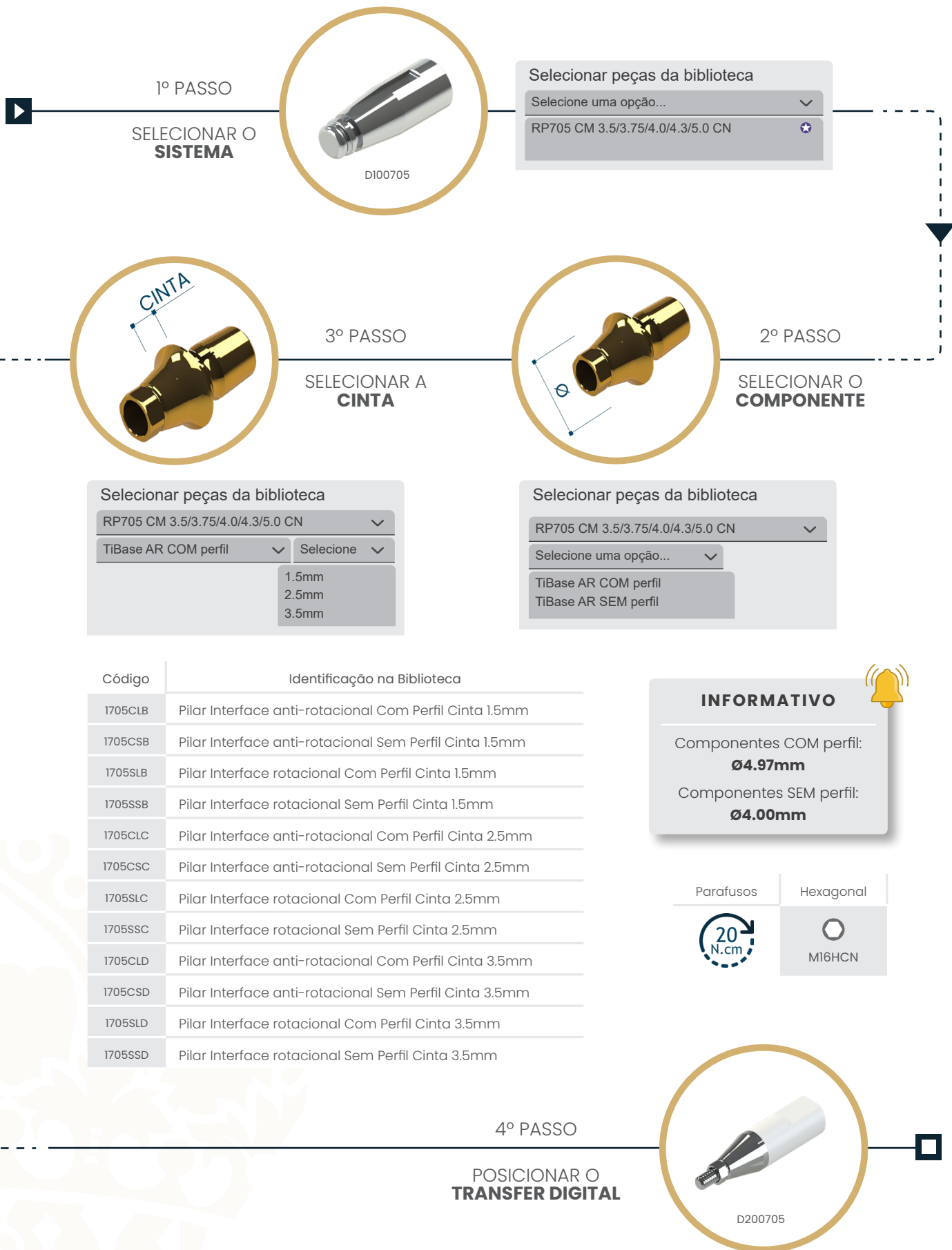

1º PASSO


SELECIONAR O
SISTEMA

D100208

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP208 HI 3.3/3.5 UN

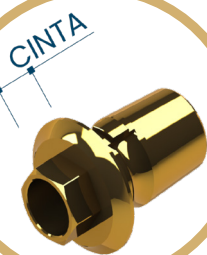

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

Selecionar peças da biblioteca


RP208 HI 3.3/3.5 UN

TiBase COM perfil

Selecione

0.6mm

1.5mm

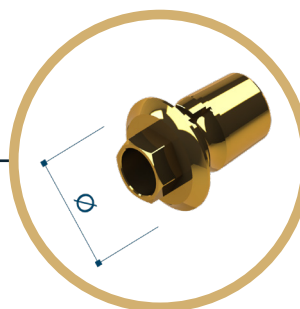

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP208 HI 3.3/3.5 UN

Selecione uma opção...

TiBase COM perfil

TiBase SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1208CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1208CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm
1208SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1208SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm
1208CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1208CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1208SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1208SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos



Hexagonal



M18HX

Quadrado



M18QU

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200208



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100209

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP209 HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0 UN

CINTA

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

Selecionar peças da biblioteca

RP209 HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0 UN

TiBase AR COM perfil

Selecione

0.6mm

1.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP209 HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0 UN

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil

TiBase AR SEM perfil

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Código

Identificação na Biblioteca

1209CLA Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

1209CSA Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm

1209SLA Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

1209SSA Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm

1209CLB Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

1209CSB Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm

1209SLB Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

1209SSB Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos

Quadrado



4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200209

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100799


Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP799 HI 3.3 MI

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

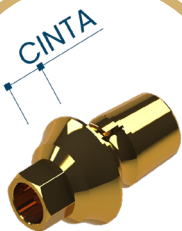

Selecionar peças da biblioteca

RP799 HI 3.3 MI


TiBase AR COM perfil

Selecione

0.5mm
1.5mm
3.0mm

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

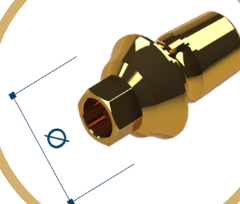

Selecionar peças da biblioteca

RP799 HI 3.3 MI

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1799CLA	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.5mm
1799CSA	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 0.5mm
1799SLA	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 0.5mm
1799SSA	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 0.5mm
1799CLB	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1799CSB	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1799SLB	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1799SSB	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1799CLC	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1799CSC	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm
1799SLC	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1799SSC	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Hexagonal



M16HMI

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL



D200799



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100800

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP800 HI 3.7/4.2 MI

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA



Selecionar peças da biblioteca

RP800 HI 3.7/4.2 MI


TiBase AR COM perfil

Selecione

0.5mm
1.5mm
3.0mm

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

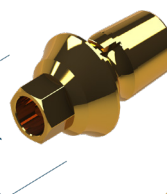

Selecionar peças da biblioteca

RP800 HI 3.7/4.2 MI

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1800CLA	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.5mm
1800CSA	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 0.5mm
1800SLA	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 0.5mm
1800SSA	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 0.5mm
1800CLB	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1800CSB	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1800SLB	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1800SSB	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1800CLC	Pilar Interface Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1800CSC	Pilar Interface Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm
1800SLC	Pilar Interface Rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1800SSC	Pilar Interface Rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Hexagonal




M18HMI


4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL



D200800

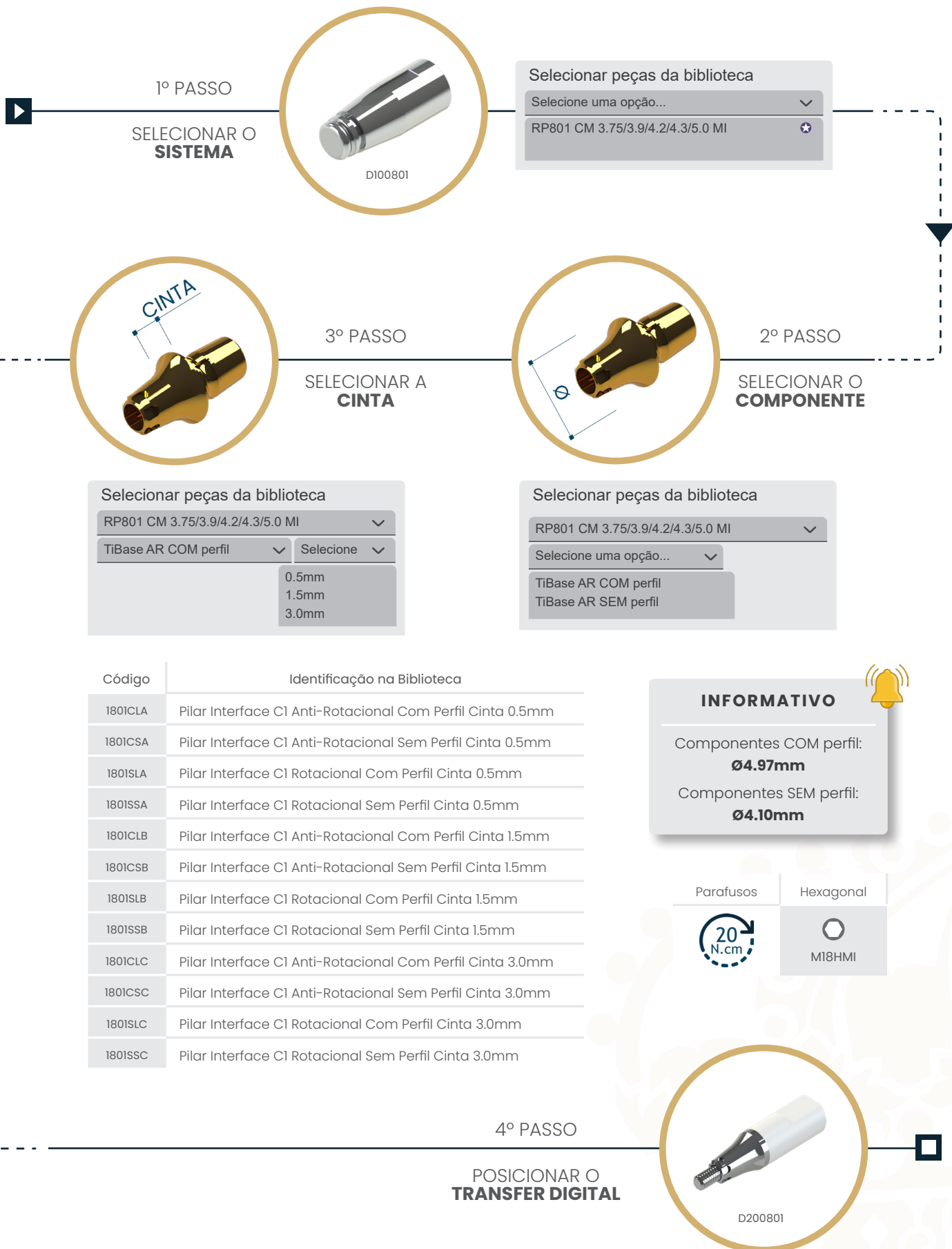

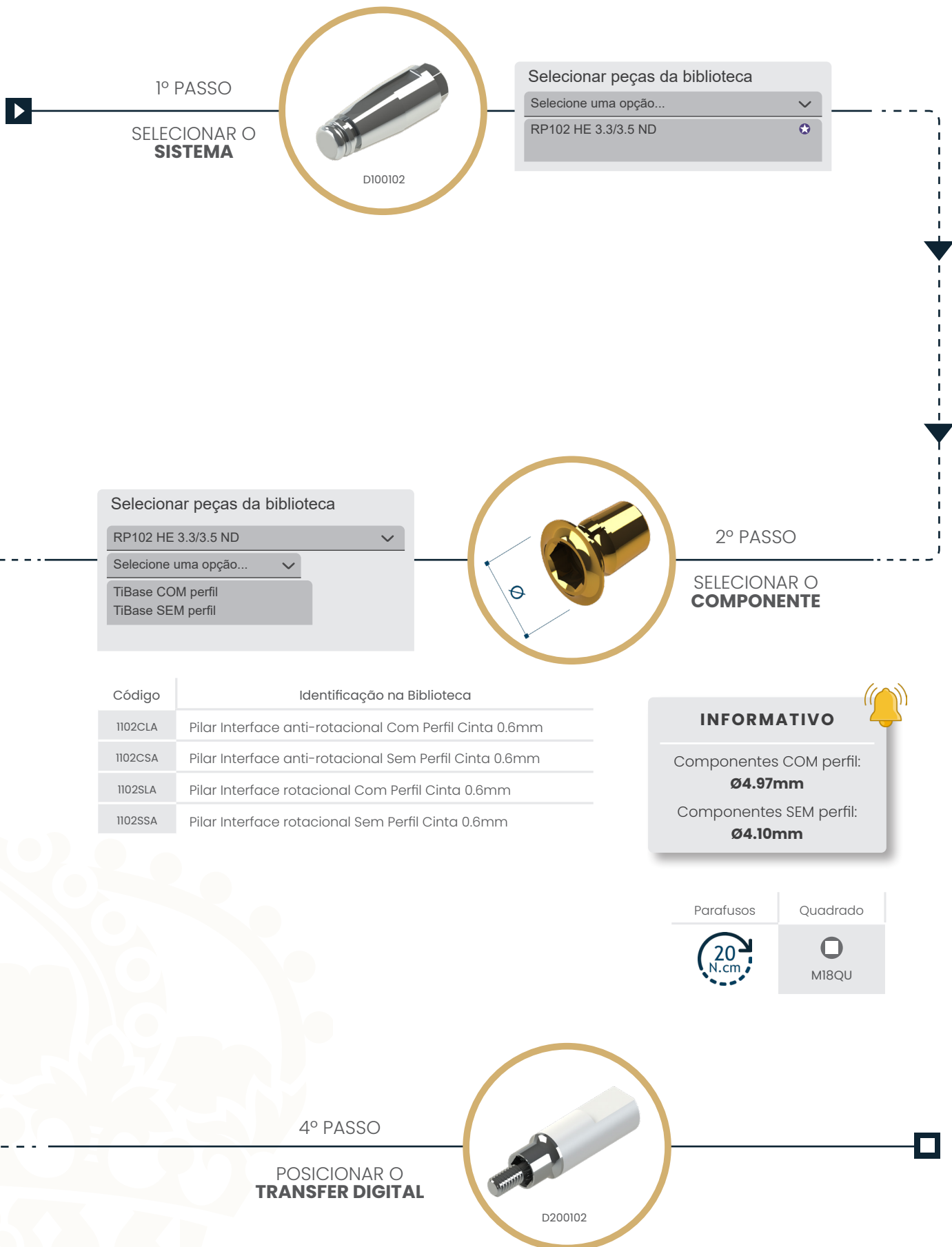

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100703

Selecionar peças da biblioteca


Selecione uma opção...

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

2º PASSO

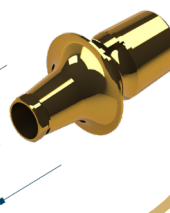SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

TiBase AR COM perfil

Selecione

0.8mm
1.5mm
2.5mm
3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1703CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1703CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1703SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1703SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1703CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1703CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1703SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1703SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1703CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1703CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1703SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1703SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1703CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1703CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1703SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1703SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos

Hexagonal



M18HND

4º PASSO - POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200703



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100720

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND



3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA


Selecionar peças da biblioteca

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND

TiBase AR COM perfil

Selecione

0.8mm
1.5mm
2.5mm
3.5mm

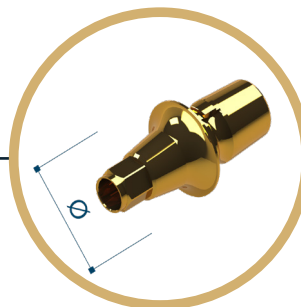

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1720CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1720CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1720SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1720SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1720CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1720CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1720SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1720SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1720CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1720CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1720SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1720SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1720CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1720CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1720SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1720SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:


Ø4.10mm

Parafusos

Hexagonal



4º PASSO - POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

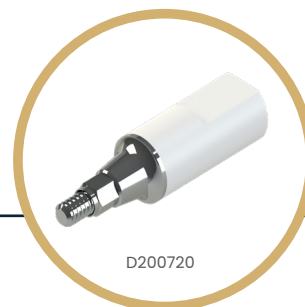

D200720



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100320

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP320 CM 3.5 NP NB

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP320 CM 3.5 NP NB

TiBase AR COM perfil

Selecione

1.5mm
2.5mm
3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP320 CM 3.5 NP NB

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1320CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1320CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1320SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1320SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1320CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1320CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1320SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1320SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1320CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1320CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1320SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1320SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos



Hexagonal



M16HEB

Unigrip



M16UEB

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200320



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA


D100321

Selecionar peças da biblioteca


Selecione uma opção...

RP321 CM 4.3/5.0 RP NB

2º PASSO

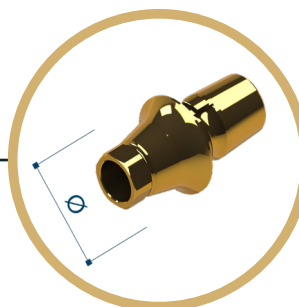SELECIONAR O
COMPONENTE

3º PASSO

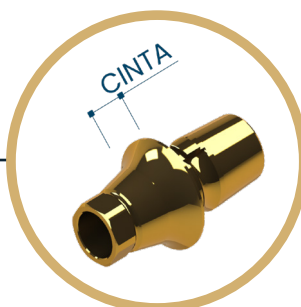SELECIONAR A
CINTA

Selecionar peças da biblioteca

RP321 CM 4.3/5.0 RP NB

TiBase AR COM perfil

Selecione

1.5mm
2.5mm
3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP321 CM 4.3/5.0 RP NB

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1321CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1321CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1321SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1321SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1321CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1321CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1321SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1321SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1321CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1321CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1321SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1321SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos




Hexagonal



Unigrip



4º PASSO

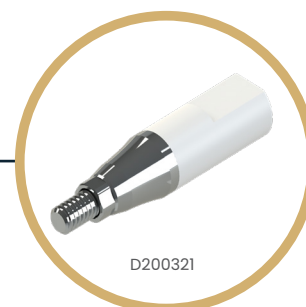POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200321



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100110

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP110 HE 5.0 RE ☆

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca


RP110 HE 5.0 RE ▾

Selecione uma opção... ▾

HE 5.0 AR

HE 5.0 ROT

TiBase AR

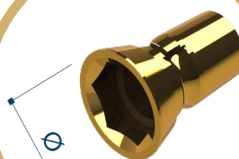

Código

Identificação na Biblioteca

1110CLB

Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

1110SLB

Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

INFORMATIVO 🔔

Componentes COM perfil:
Ø5.00mm

Parafusos

Quadrado



4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL



D200110

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100712



Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP712 CM 3.5/3.8/4.5/5.0 SI

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

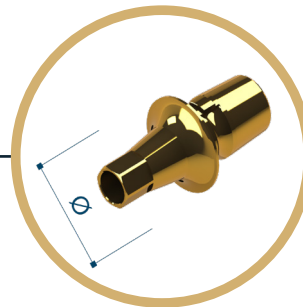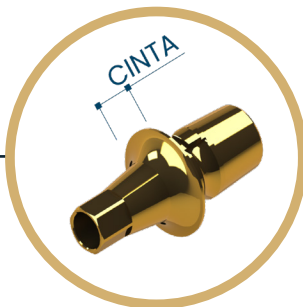

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP712 CM 3.5/3.8/4.5/5.0 SI

TiBase AR COM perfil

Selecione

1.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm

Selecionar peças da biblioteca

RP712 CM 3.5/3.8/4.5/5.0 SI

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1712CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
1712CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm
1712SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
1712SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm
1712CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm
1712CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm
1712SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm
1712SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm
1712CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1712CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm
1712SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm
1712SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm
1712CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 4.0mm
1712CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 4.0mm
1712SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 4.0mm
1712SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 4.0mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm


Parafusos

Hexagonal



M16HSI

4º PASSO - POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

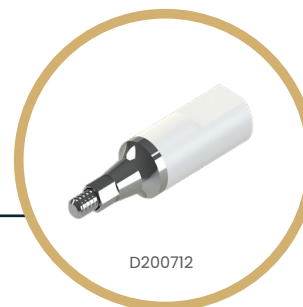

D200712

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA



D100703



Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

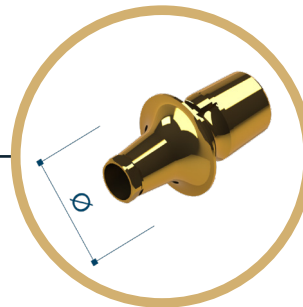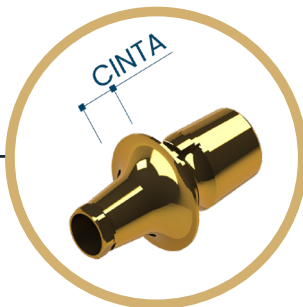

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

TiBase AR COM perfil

Selecione

0.8mm
1.5mm
2.5mm
3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP703 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 ND

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código Identificação na Biblioteca

1703CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1703CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1703SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1703SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1703CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1703CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1703SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1703SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1703CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1703CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1703SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1703SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1703CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1703CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1703SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1703SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm


Parafusos

Hexagonal



M18HND

4º PASSO - POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

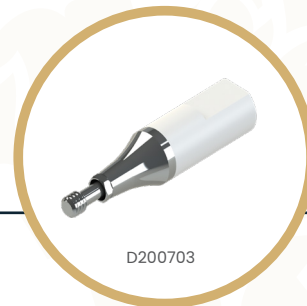

D200703



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100751

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP751 AP NC 3.5 ST ☆

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP751 AP NC 3.5 ST ▾

Selecione uma opção... ▾

TiBase AR COM perfil 0.6mm



Código

Identificação na Biblioteca

1751CLA

Pilar Interface AP NC Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

1751SLA

Pilar Interface AP NC Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

INFORMATIVOComponentes COM perfil:
Ø4.00mm

Parafusos




Unigrip



M14UMU

4º PASSO

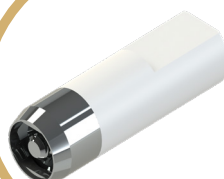POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200751

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100752

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP752 NC RC 4.6 ST ☆

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP752 NC RC 4.6 ST ▾

Selecione uma opção... ▾

TiBase AR COM perfil 0.6mm



Código

Identificação na Biblioteca

1752CLA

Pilar Interface AP NC/RC anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

1752SLA

Pilar Interface AP NC/RC Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

INFORMATIVO Componentes COM perfil:
Ø4.90mm

Parafusos

Unigrip



4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200752

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100750

Selecionar peças da biblioteca


Selecione uma opção...

RP750 NC 3.3 ST

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

2º PASSO

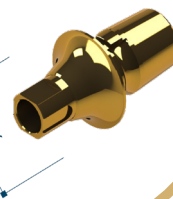SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP750 NC 3.3 ST

TiBase AR COM perfil

Selecione

1.0mm

2.0mm

3.0mm

Selecionar peças da biblioteca

RP750 NC 3.3 ST

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil

TiBase AR SEM perfil

Código

Identificação na Biblioteca

1750CLA Pilar Interface NC anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm

1750CSA Pilar Interface NC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm

1750SLA Pilar Interface NC rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm

1750SSA Pilar Interface NC rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm

1750CLB Pilar Interface NC anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm

1750CSB Pilar Interface NC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm

1750SLB Pilar Interface NC rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm

1750SSB Pilar Interface NC rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm

1750CLC Pilar Interface NC anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm

1750CSC Pilar Interface NC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

1750SLC Pilar Interface NC rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm

1750SSC Pilar Interface NC rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

PVB750A Pilar Interface VB NC 3.3 anti-rotacional Cinta 1mm ST

PVB750B Pilar Interface VB NC 3.3 anti-rotacional Cinta 2mm ST

PVB750C Pilar Interface VB NC 3.3 anti-rotacional Cinta 3mm ST

INFORMATIVO



Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos

Torx



M16TNC

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200750



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100790

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

CINTA

Selecionar peças da biblioteca


RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST

TiBase AR COM perfil

Selecione

0.7mm
1.5mm
2.5mm

2º PASSO

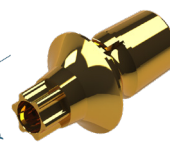SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil
TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1790CLA	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.7mm
1790CSA	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 0.7mm
1790SLA	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 0.7mm
1790SSA	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 0.7mm
1790CLB	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1790CSB	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1790SLB	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1790SSB	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1790CLC	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1790CSC	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1790SLC	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1790SSC	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Hexagonal



M16HCOC

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200790



1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100755

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP755 RC 4.1/4.8 ST

3º PASSO

SELECIONAR A
CINTA

Selecionar peças da biblioteca

RP755 RC 4.1/4.8 ST

TiBase AR COM perfil

Selecione

1.0mm

2.0mm

3.0mm

2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP755 RC 4.1/4.8 ST

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil

TiBase AR SEM perfil

VARIOBASE

Código

Identificação na Biblioteca

1755CLA Pilar Interface RC anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm

1755CSA Pilar Interface RC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm

1755SLA Pilar Interface RC rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm

1755SSA Pilar Interface RC rotacional Sem Perfil Cinta 1.0mm

1755CLB Pilar Interface RC anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm

1755CSB Pilar Interface RC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm

1755SLB Pilar Interface RC rotacional Com Perfil Cinta 2.0mm

1755SSB Pilar Interface RC rotacional Sem Perfil Cinta 2.0mm

1755CLC Pilar Interface RC anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm

1755CSC Pilar Interface RC anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

1755SLC Pilar Interface RC rotacional Com Perfil Cinta 3.0mm

1755SSC Pilar Interface RC rotacional Sem Perfil Cinta 3.0mm

PVB755A Pilar Interface VB RC 4.1/4.8 anti-rotacional Cinta 1mm ST

PVB755B Pilar Interface VB RC 4.1/4.8 anti-rotacional Cinta 2mm ST

PVB755C Pilar Interface VB RC 4.1/4.8 anti-rotacional Cinta 3mm ST

INFORMATIVO

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos

Torx



4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200755

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100730

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP730 RN 3.3/4.1/4.8 ST ☆


2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP730 RN 3.3/4.1/4.8 ST ▾

Selecione uma opção... ▾

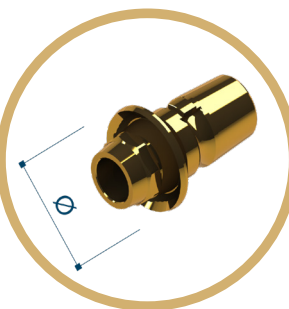TiBase AR COM perfil 1mm
VARIORBASE RN AR

Código

Identificação na Biblioteca

1730CLA	Pilar Interface RN Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
1730SLA	Pilar Interface RN Rotacional Com Perfil Cinta 1.0mm
PVB730A	Pilar Interface VB RN 3.3/4.1/4.8 anti-rotacional Cinta 1mm ST

INFORMATIVOComponentes COM perfil:
Ø4.97mm

Parafusos

Torx



M20TRNZ

4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200730

1º PASSO

SELECIONAR O
SISTEMA

D100736

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP736 WN 4.8/6.5 ST ☆


2º PASSO

SELECIONAR O
COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP736 WN 4.8/6.5 ST ▾

Selecione uma opção... ▾

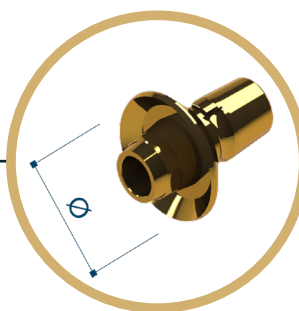TiBase AR COM perfil 1.5mm
VARIORBASE AR 1.0mm

Código

Identificação na Biblioteca

1736CLA	Pilar Interface WN Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1736SLA	Pilar Interface WN Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
PVB736A	Pilar Interface VB WN 4.8/6.5 anti-rotacional Cinta 1.5mm ST

INFORMATIVOComponentes COM perfil:
Ø6.50mm

Parafusos


Torx



4º PASSO

POSICIONAR O
TRANSFER DIGITAL

D200736

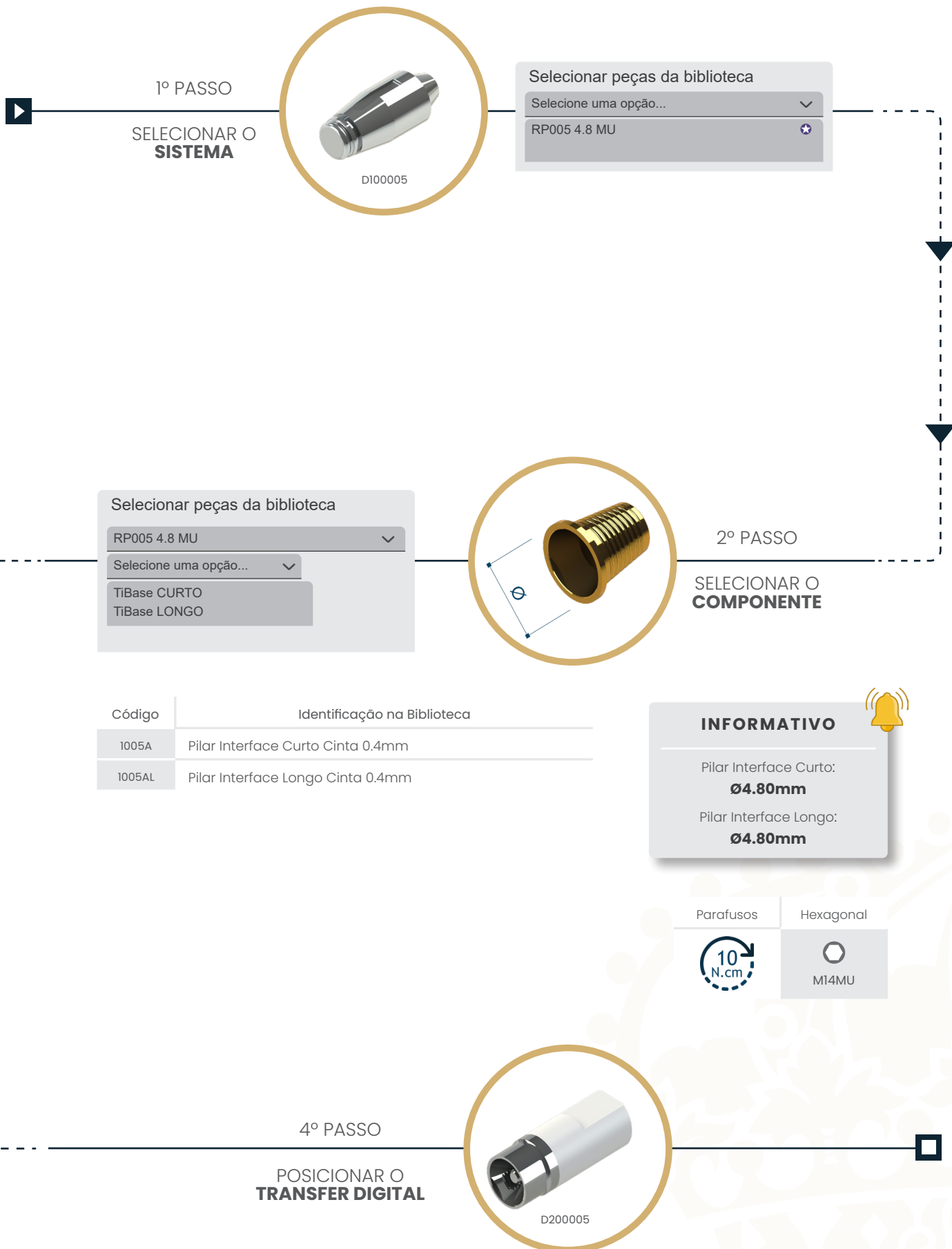



ESTAMOS SEMPRE À DISPOSIÇÃO,
ENTRE EM CONTATO E TIRE SUAS DÚVIDAS.



/RPCOMPONENTES



RPCOMPONENTES.COM.BR

RUA DANILO VALBUZA, 333 - LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP - BRASIL - CEP. 07747-300
+55 11 4441.3854

